

## UUDEN POLVEN PLANTAARITYNYNYT COMFORTACT™ PLUS

PATENTOIDUT TYNYNYT = MIELLYTTÄVÄMPI RATKAISU



### PEHMEÄ, OHUT kangas

> Miellyttävä käyttää,  
poistaa hiekiä

### SILIKONIGEELIOSA

> Jakaa painetta ja  
lievittää kipua

### KUULAMAINEN TUNTUMA

> Muotoutuu jalan  
muotoon miellyttävästi

**KAAREVA NAUHA**  
> Mukava  
varpaiden välissä

**JOUSTAVA KANGAS**  
> Kestää käyttöä  
kengässä

### KÄYTTÖTARKOITUS:

COMFORTACT™ PLUS -tyyny suojaavat päkiää vähentämällä siihen kohdistuvaa painetta ja lievittävät kipua.

### VASTA-AIHEET:

Ei saa käyttää rikkoutuneella iholla. Jos sinulla on valtimotulehdus, diabetes, polyneuriitti, alaraajojen neuropatia tai haavaumia, kysy neuvoa lääkäriltä tai jalkaterapeutilta ja tarkkaile jalkaa suojan käytön aikana.

### OMINAISUUDET:

Erittäin miellyttävä, ergonominen nauha muotoutuu isovarpaan luontaisten kaarien mukaan, mikä pienentää varvasvälän ärsytyksen riskiä. Plantaarialueella EPITHELIUM 26® -silikonigeelistä valmistettu osa tuntuu kuin kuulilta. Se on kehitetty muotoutumaan miellyttävästi päkiän ympärille ja jakamaan painetta.

### ERGONOMIA:

Ainutlaatuisen muotoilun ja materiaalin tasaisen jouston ansiosta jalalle asettava paino on optimaalinen. Tyynyt ovat ohuita, joten kapeiden kenkien käyttäminen on mahdollista, ja kävely pysyy vakaana.

### HOITO-OHJEET

Konepesu 30°C:n lämpötilassa mukana toimitettavassa pesupussissa tai käsinpesu (hankaamatta). Anna kuivua itseksensä. Ei saa silittää.

**KOOSTUMUS:** 84 % silikonia, 16 % polyamidi-elastaanikangasta.

Käytetyt materiaalit ovat läpäisseet kaikki ISO-standardissa 10993-1 määritellyt ihon kanssa kosketuksiin tulevia materiaaleja koskevat viranomaiset. Jos tuote aiheuttaa ongelmia, lopeta sen käyttö välittömästi ja ilmoita asiasta MILLET Innovation -yhtiölle. Millet Innovation ei ole vastuussa siitä, jos tuotetta käytetään valmistajan suositusten vastaisesti. Viitekielenä on ranska. Alkuperäinen CE-merkintä: 2020.



Konepestävä 30 °C:n  
lämpötilassa.



Ei saa silittää  
eikä höyryttää.



Ei kemiallista  
pesua.



Ei saa valkaista.



Ei saa  
rumpukuivata.



Ks. pakkaus.

Millet Innovation -yhtiön tutkimustyön tulos.



MILLET Innovation  
ZA Chamgrand 26270 Lorio/Drôme  
RANSKA



MILLET  
INNOVATION

www.epitact.fi