

## DIGITUBES®

### KÄYTTÖTARKOITUS

Digitubes®-putket suojaavat, lievittävät kipua ja poistavat känsiä.

### VASTA-AIHEET

Älä käytä vaurioituneelle iholle. Jos sinulla on valtimotulehdus, diabetes, alaraajojen neuropatia tai haavaumia, kysy neuvoa lääkäriltä tai jalkaterapeutilta ennen käyttöä ja tarkkaile jalkaa säännöllisesti.

### VAROITIMENPITEET

- Leikkaa Digitube halutun pituiseksi terävillä saksilla.
- Poista suojakalvo geelin päältä.
- Käännä Digitube® nurinpäin ja aseta se varpaan päälle. Tarkista, että Epithelium™-geeli koskee suojattavaa aluetta.

### OMINAISUUDET

Liiallinen hankaus ja paine voivat aiheuttaa ihon kovettumia, joita kutsutaan känsiksi. Digitubes®-putkissa käytettävä EPITHELIUM™-geeli suojaa varpaita, lievittää kipua välittömästi ja edistää känsien häviämistä.

### MUOTOILU

Digitubes®-putki on hyvin ohut, patentoitu suoja, jossa on 1 mm EPITHELIUM™-geeliä vain puolikkaan ympäröimän alueella. Siksi suoja voidaan käyttää vierekäisissä varpaissa ilman epämukavuutta.

### HOITO-OHJEET

Käsinpestävä ja uudelleenkäytettävä. 2,5 cm:n kokoista Digitube-putkea voi käyttää känsän suojana keskimäärin 10 vuorokautta.

**KOOSTUMUS:** 73 % silikonia, 27 % polyamidi-elastaanikangasta.

Käytetyt materiaalit ovat läpäisseet kaikki ISO-standardissa 10993-1 määritellyt ihon kanssa kosketuksiin tulevia materiaaleja koskevat viranomaiset. Jos tuote aiheuttaa ongelmia, lopeta sen käyttö välittömästi ja ilmoita asiasta MILLET Innovation -yhtiölle. Millet Innovation ei ole vastuussa siitä, jos tuotetta käytetään valmistajan suositusten vastaisesti. Viitekielenä on ranska. Alkuperäinen CE-merkintä: 2020.



Käsinpestävä.



Ei saa silittää eikä höyryttää.



Ei kemiallista pesua.



Ei saa valkaista.



Ei saa rumpukuivata.



Ks. pakkaus.

Millet Innovation -yhtiön tutkimustyön tulos.



MILLET Innovation  
ZA Champgrand 26270 Lorient/Drôme  
RANSKA

**MILLET  
INNOVATION**

[www.epitact.fi](http://www.epitact.fi)

N19557-B  
06/2021