

PHYSIO'CHOC™-KANTAPÄÄTYNNYT

KÄYTTÖTARKOITUS

Ehkäisee ja lievittää nivel- ja selkäkkipua, joka johtuu askeleen aiheuttaman iskun välittymisestä kehoon. Lievittää kantapiikkien aiheuttamaa kipua.

VASTA-AIHEET

- Jos saat allergisen reaktion, lopeta tuotteen käyttö heti ja ilmoita asiasta MILLET Innovation -yhtiölle.
- Ei saa käyttää rikkoutuneella iholla.
- Jos sinulla on valtimotulehdus, diabetes, polyneuriitti, alaraajojen neuropatia tai sääriraavoja: tuotetta ei saa koskaan käyttää haavan päällä, ja jalkaa on tarkkailtava käytön aikana. Kysy myös aina neuvoa lääkäriltä tai jalkaterapeutilta.

VAROITIMENPITEET

- Kantapäätynnyä on käytettävä sukkiensa tai sukkahousujen kanssa.
- Ennen ensimmäistä käyttökertaa poista suoja-alvo kaksipuolisen kiinnitysteipin päältä. Aseta kantapäätynnyt kenkiin.
- Jos kantapäätynnyt ovat jalkineisiin liian suuret, ne voidaan leikata saksilla halutun kokoisiksi.

OMINAISUUDET

- Jalkaterapeuttien validoima Physio'Choc™-materiaali absorboi iskuja tehokkaasti. Tästä materiaalista valmistettujen kantapäätynnyjen käyttö hajottaa energiaa, jota syntyy jalan iskeytyessä maahan. Tämä vähentää nivel- ja selkäkkipua.
- Kantapäätynnyt myös kohottavat kantapäätä 5 mm, mikä vähentää jalkapohjan kalvojänteen jännitystä ja myös kantapiikkistä aiheutuvaa epämukavuutta.

HOITO-OHJEET

Kantapäätynnyt eivät ole pestäviä.

KOOSTUMUS

76 % Physio'Choc™-materiaalia (elastomeeria), 24 % silikonia.

Käytetyt materiaalit ovat läpäisseet kaikki ISO-standardissa 10993-1 määritellyt ihon kanssa kosketuksiin tulevia materiaaleja koskevat viranomaistestit. Jos tuote aiheuttaa ongelmia, lopeta sen käyttö välittömästi ja ilmoita asiasta MILLET Innovation -yhtiölle. Millet Innovation ei ole vastuussa siitä, jos tuotetta käytetään valmistajan suositusten vastaisesti. Viitekielenä on ranska. Alkuperäinen CE-merkintä: 2020



Ei saa pestä.



Ei saa silittää eikä höyryttää.



Ei kemiallista pesua.



Ei saa valkaista.



Ei saa rumpukuivata.



LOT Ks. pakkaus.

Millet Innovation -yhtiön tutkimustyön tulos.



MILLET Innovation
ZA Champgrand 26270 Lorient/Drôme
RANSKA

MILLET
INNOVATION

www.epitact.fi

N19555-B
06/2021